

 СИМС-2



Персональный анализатор
алкоголя
Динго А-025

Руководство пользователя

www.alcotester.ru

содержание

Поздравляем Вас с приобретением алкотестера Динго А-025. Он определит содержание алкоголя у Вас в крови в течение нескольких секунд.

Цифровые показания округляются до десятых долей промилле. Перед началом эксплуатации прочтите, пожалуйста, настоящее руководство.

подготовка к работе	2
введение.....	3
проведение теста.....	4
спецификация	6
важные предупреждения	6
калибровка	8
гарантия и сервис	9

подготовка к работе

Установка батареек

Слегка нажмите на выемку крышки с тыльной стороны Динго А-025 и сдвиньте ее вниз. Вставьте две щелочные батарейки АА, соблюдая полярность. Вставьте на место крышку.

ВВЕДЕНИЕ

Алкотестер Динго А-025 представляет собой персональный анализатор паров алкоголя в выдыхаемом воздухе. Прибор пересчитывает полученные данные на концентрацию алкоголя в крови и выдает результат на трехразрядный цифровой дисплей в единицах промилле (грамм алкоголя в литре крови).

Для питания используются две щелочные (алкалиновые) батарейки АА. Алкотестер очень прост в эксплуатации, тем не менее перед началом работы настоятельно рекомендуем прочитать настоящую инструкцию.

Важные предупреждения:



Необходимо выждать не менее 20 мин после употребления алкоголя, пищи или курения прежде чем приступать к продуванию. В противном случае алкотестер может выдать неправильные показания, либо это может привести к повреждению чувствительного к алкоголю датчика.

проведение теста

1.1 Включение

Нажмите кнопку, удерживая ее нажатой в течение 1 секунды. Начинается процесс подготовки к тестированию, сопровождаемый обратным отсчетом, который может длиться до 2 минут.

При этом на дисплее горит надпись Жди (Wait).

Окончание подготовки сопровождается звуковым сигналом, на дисплее появляется надпись 0.00

1.2 Проведение теста

Вставьте новый мундштук в гнездо над дисплеем и продуйте воздух в течение 5 секунд, не прерывая выдоха.

Примечание: возможно проведение выдоха и без применения мундштуков (свободным продуванием в гнездо для мундштука с расстояния примерно 3–5 см), но в этом случае показания алкотестера будут менее точным.

1.3 Считывание результатов

Если алкоголь в выдохе отсутствует, прибор может не среагировать на продувание, либо прозвучит одиночный звуковой сигнал, нули на дисплее мигают и установятся.

- при концентрациях до 0,20 промилле звучит одиночный звуковой сигнал

- при концентрациях 0,30–0,50 промилле звучит двойной звуковой сигнал

- при концентрациях выше 0,50 промилле звучит продолжительный звуковой сигнал.

1.4 Сообщение об ошибке

При недостаточной силе или продолжительности выдоха на дисплее появляется сообщение об ошибке «Е». Необходимо повторить продувание.

1.5 Выключение

Алкотестер Динго А-025 можно выключить в любой момент однократным нажатием кнопки включения. Если не пользоваться прибором более пяти минут, он выключится автоматически.

1.6 Замена батареек

Если после достижения готовности символ батарейки остается гореть на дисплее, необходимо заменить батарейки. Замените батарейки, соблюдая полярность.

Внимание! Меняйте обе батарейки одновременно. Используйте только щелочные (алкалиновые) батарейки. Показания прибора с разряженными батарейками могут не соответствовать реальным. На одном комплекте батареек можно провести до 200 тестов.

спецификация

размеры	104 x 40 x 20 мм
вес	85 г
сенсор	полупроводниковый
диапазон показаний	0,00 – 4,00 промилле
питание	2 батарейки АА
прод-сть работы	до 200 тестов
время подготовки	не более 120 секунд
время отклика	2 секунды
дискретность шкалы	0,10 промилле
раб. температура	10 – 40°C
срок службы	3 года

важные предупреждения

1. Проверку следует производить не ранее, чем через 20 минут после употребления спиртных напитков, приема пищи или курения
2. Попадание сигаретного дыма или слюны в сенсор может вывести прибор из строя.
3. Не храните прибор вблизи от источников запахов (косметичка) или нагревательных приборов.

4. Не рекомендуется проводить проверку под сильным ветром или в помещении с загрязненной атмосферой.
5. После проведения тестов с высоким содержанием алкоголя до начала следующего теста следует 4–5 раз встряхнуть прибор для более эффективной очистки датчика.
6. Для сохранения точности показаний рекомендуется настраивать (заменять сенсорный элемент) приблизительно через каждые 300 тестов.
7. Диабет, низкокалорийная диета и некоторые другие факторы приводящие к повышению концентрации кетонов в выдохе могут вызывать ложно-положительные результаты. Проконсультируйтесь с врачом.
8. Срок службы датчика и точность показаний существенно уменьшаются при:
 - а) продувании через прибор предельных концентраций алкоголя
 - б) использовании алкотестера для массовых проверок
9. Алкотестер Динго А-025 не предназначен для профессиональной деятельности.
10. Показания прибора не являются доказательными – независимо от количества принятого спиртного не следует садиться за руль.

калибровка

Алкотестер Динго А-025 поступает в продажу с заводской калибровкой, производящейся на специальном оборудовании. В процессе работы чувствительный к алкоголю датчик прибора изнашивается, что приводит к постепенному росту погрешности измерений. Для восстановления точности необходимо время от времени проводить настройку алкотестеров в специализированном сервисном центре. Периодичность технического обслуживания зависит, в основном, от интенсивности использования прибора. В среднем необходимо производить настройку через каждые 300 тестов.

гарантия и сервис

ООО «СИМС-2», являясь официальным представителем компании-производителя гарантирует, что приобретенный Вами алкотестер не имеет производственных дефектов в части материалов и комплектующих на момент продажи и обязуется произвести бесплатный ремонт вышедших из строя элементов в течение всего срока действия гарантии, за исключением регламентного технического обслуживания, вызванного естественным износом сенсорного датчика.

Гарантийное обслуживание осуществляется в СЦ ООО «СИМС-2» или авторизованных региональных сервисных центрах.

Доставка (отправка) алкотестеров в СЦ и получение из СЦ осуществляется силами и на средства покупателя.

Срок гарантии — 12 месяцев.

Внимание!

Гарантия не распространяется на химические источники питания.

Прибор принимается к гарантийному обслуживанию только при наличии паспорта (руководства по эксплуатации) с указанием даты продажи и с печатью торгующей организации.

ООО «СИМС-2» оставляет за собой право отказать в бесплатном гарантийном обслуживании в следующих случаях:

1. Утерян или неправильно заполнен гарантийный талон, либо Руководство по эксплуатации, из-за чего невозможно установить дату продажи аппарата.
2. Аппарат подвергался несанкционированному вскрытию.
3. Аппарат использовался с нарушением правил эксплуатации.
4. Аппарат имеет следы механических повреждений, вызванных ударами, падением либо попытками вскрытия.
5. Аппарат имеет повреждения, вызванные попаданием внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей или насекомых.
6. Аппарат имеет повреждения, вызванные применением нестандартных комплектующих и аксессуаров.

В случае отказа от гарантийного обслуживания покупателю выдается акт технической экспертизы с обоснованием причины отказа.

Информация о пунктах технического обслуживания размещена на сайте www.alcotester.ru

e-mail: support@alcotester.ru

Алкотестер Динго А-025
Производитель: Sentech Korea Corp. № В03 Ilsan
TechnoTown 1141-1 Bakseok, Ilsan, Goyang, Kyeonggi,
Korea

Поставщик: ООО «СИМС-2»
125363, г. Москва, ул. Новопоселковая, д. 6
Тел./факс: (495) 792-31-90;
Тел. 8(800)200-31-90 (беспл.)
www.alcotester.ru

Дата продажи	
--------------	--

Подпись
продавца

М.П.

